

可動式手すり

KDS-55 ブラケット

本書はいつでも必要な時に見られるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意

- 使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

 **注意**

この表示を実行しない場合、傷を負う可能性と物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 **お願い**

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。



この記号はやってはいけないことを告げるものです。

お手入れ方法

 **お願い**

ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きをしてください。仕上げに乾拭きして、水分を完全に除去してください。

 **注意**

酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。

酸性、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー等はツヤがなくなったり、変形、変色の原因になりますので使用しないでください。



クレンザー、磨き粉は使用しないでください。

クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷を付けやすいものは使用しないでください。



製品を分解・改造しないでください。

施工後は固定部のボルト等をゆるめたり、製品を分解・改造しないでください。使用時に脱落したり予期せぬ故障の原因になるばかりか、重大事故につながる場合があります。



ご利用の前に

 **注意**

強い衝撃を与えないでください。

本製品に物をぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。手すり部分が破損し、思わぬケガの原因になります。



切り付けたり火を近づけないでください。

手すりをカッター等で切り付けしないでください。表面がささくれると思わぬケガの原因になります。又、タバコなどの裸火を近づけないでください。表面が変形・変色します。



製品にぶら下がらないでください。

手すりの上に乗ったり、ぶらさがったりしないでください。手すりの破損及び転倒しケガの恐れがあります。




製品に座ったり、乗ったりしないでください。

手すりを故意に揺すったり、イタズラにレバーを押したり、カバーを取ったりしないでください。使用中に壊れて思わぬケガの原因になります。



分解したり、ボルトを緩めないでください。

施工後はむやみに固定部のボルト等をゆるめないでください。重大事故につながります。

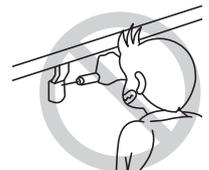



 **お願い**

本製品に破損がみられた場合はすぐに使用を止めて、最寄りの問い合わせ先へご相談ください。



収納するとき

収納手順

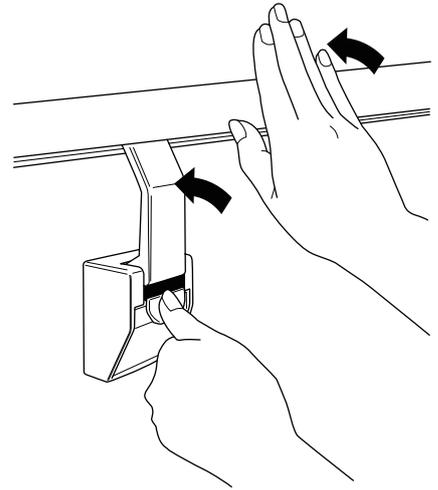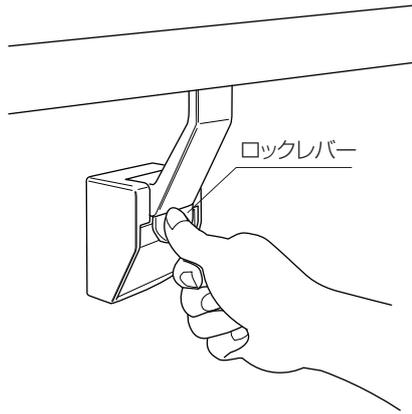

⚠ 注意

手すりを壁側に動かす際、壁と手すりの間に指を挟まないように十分にご注意ください。

❗ お願い

手すりの収納は手順に正しくしたが、い2人又は3人で行ってください。

1 ロックの解除

各ブラケットのロックレバーを同時に指で下へ押し下げて、ロックを解除します。ボタンを離してしまうとロックが再びかかります。

2 手すり本体を動かします



ロックが外れた状態で指を挟まないように注意しながら、手すりを静かに壁側へ倒します。手すりが動き出したらロックレバーから指を離してください。

どうしても一人で収納する場合

端のブラケットのロックを解除した後、手すりを壁側へ押し付けた状態で次のブラケットへ移動し、ロックを解除していきます。

復帰するとき

展開手順

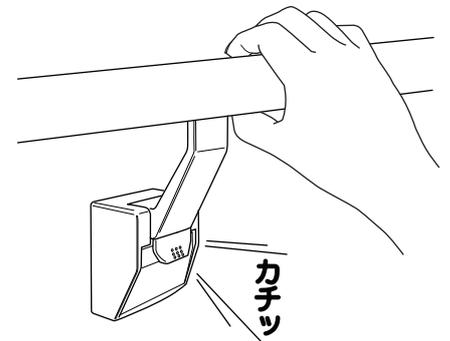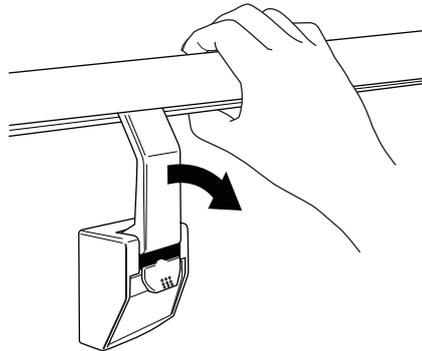

⚠ 注意

ブラケットの可動部分に指を挟まないように十分注意してください。

❗ お願い


手すりの復帰後に手すりを軽く前後に動かし、しっかりとロックされていることを確認してください。

1 ロックの解除


手すり本体を持って手前に引き戻します。

2 ロックの解除

ロックがカチッと音がするまで手前に引きます。ロックがしっかりとかかっているか確認します。

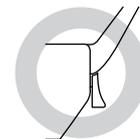

ロックがかかっている状態

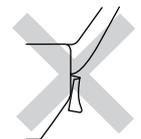

ロックがはずれている状態

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社

URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノメタル株式会社

URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。