

本製品は動作補助のための手すりです。玄関やトイレ、廊下など室内の乾燥した場所に設置し、定期的な清掃・メンテナンスを行うことでいつまでも気持ちよく使用できる製品です。

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

**警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**お願い**

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。



この記号はやってはいけないことを告げるものです。

お手入れ方法

**お願い**

ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きをしてください。仕上げに乾拭きして、水分を完全に取除いてください。

**注意**

酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。

酸性、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー等はツヤがなくなったり、変形、変色の原因になりますので使用しないでください。



クレンザー、磨き粉は使用しないでください。

クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷を付けやすいものは使用しないでください。



ご利用の前に

**警告**

ガタツキがあるものは使わないでください。

本製品にガタツキ等の不具合が発生した場合、そのままご使用を続けますと、手すりが外れて重大事故につながる場合があります。そのような場合は直ちに使用をやめ、最寄りの弊社相談窓口にご連絡ください。



製品を分解・改造しないでください。

施工後は固定部のボルト等をゆるめたり、製品を分解・改造しないでください。使用時に脱落したり予期せぬ故障の原因になるばかりか、重大事故につながる場合があります。

**注意**

強い衝撃を与えないでください。

本製品に物をぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。手すり部分が破損し、思わぬケガの原因になります。



火を近づけないでください。

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。



製品にぶら下がらないでください。

本製品にぶら下がると、手すりが破損し、思わぬケガの原因になります。ブラケット取付部分の壁が破損するおそれもあります。



破損があるものは使わないでください。

手すり部分にささくれ、大きなヘコミ等の破損がみられた場合はすぐに使用を止めてください。手にケガをする恐れがあります。



安全荷重以上の力をかけないでください。

安全荷重は、水平・鉛直共588N (60kgf) です。それ以上の荷重をかけないでください。ゆがみや脱落等故障の原因となります。

**お願い**

本製品に、破損やささくれ等がみられた場合はすぐに使用を止めて、最寄りの弊社の問い合わせ先へご相談ください。



お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

ナカ工業株式会社

URL <https://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノタクル株式会社

URL <https://www.naka-techno.co.jp>



左の QR コードを読み取りアクセスしてください。

25式取施-NWS-S-1型

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

**警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**お願い**

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。



この記号はやってはいけないことを告げるものです。

**警告****必ず実行**

必ず強度のある壁や建築構造体に取り付けてください。

強度の弱い壁や、石膏ボードで下地の無い壁などに手すりを施工すると、使用中に壁が壊れたり、アンカーが抜けるなどして、手すりが外れ重大な事故につながる可能性があります。このような場合、必ず本書の施工手順に記載した施工例にそった下地補強を行った上で、手すりを施工してください。

**注意****分解禁止**

施工業者以外は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

破損の原因になります。使用中に外れたりして使用される方が転倒し、ケガをするおそれがあります。



屋外や浴室には絶対に使用しないでください。

本体が木製のため、屋外や浴室など濡れやすい場所で使用すると、腐食により手すりが破損し、使用される方がケガをするおそれがあります。

**必ず実行**

必ず同梱のタッピンねじを使用してください。


同梱のタッピンねじを使用しないと、手すりが外れたり、壁が壊れたりして、使用される方が転倒し、ケガをするおそれがあります。

**必ず実行**

取付完了後、手すりにガタツキが無いことを確認してください。

手すりにガタツキがあると、手すりが外れたり、壁が壊れたりして、使用される方が転倒し、ケガをするおそれがあります。

梱包内容

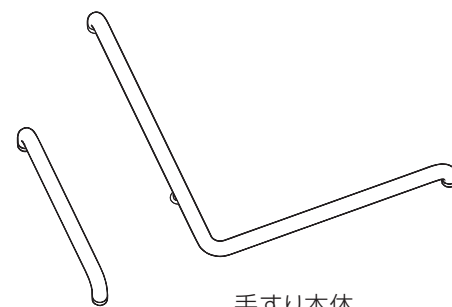


手すり本体

止めねじ (M4×4)

× 4 個

製品寸法

【I 型】

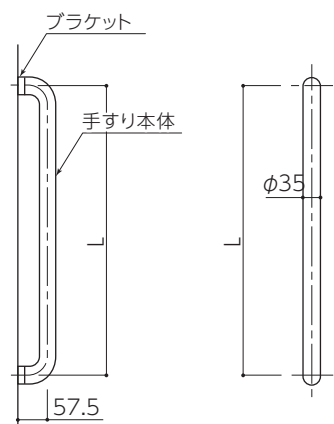

品 番	L 寸法
NWS-S-I-45 / NWH-S-I-45	450
NWS-S-I-60 / NWH-S-I-60	600
NWS-S-I-80 / NWH-S-I-80	800

【仕様】


笠木／

標準笠木：バーチ集成材 ウレタン塗装 20μm

特注笠木：ウォルナット集成材 ウレタン塗装 40μm

ブラケット／亜鉛ダイカスト（焼付塗装）


【L 型】

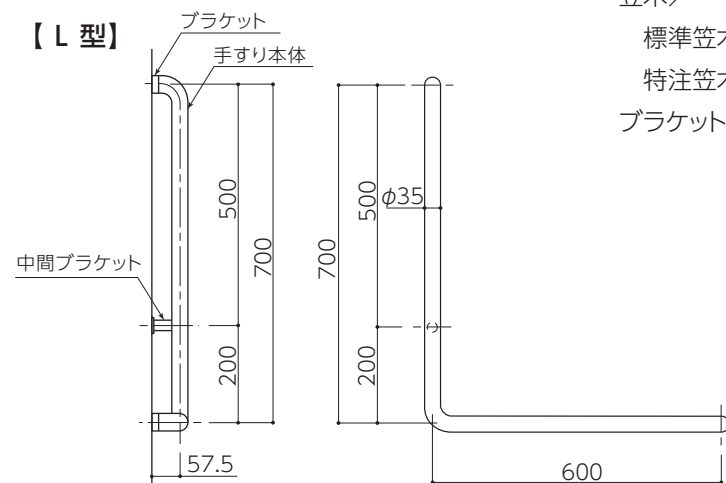


図は右勝手

取付例


【LGS+石膏ボード壁】

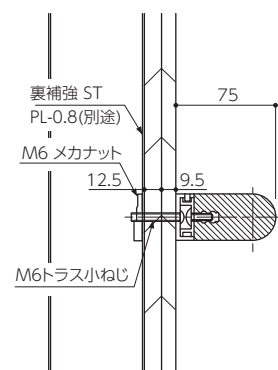

【LGS+合板】

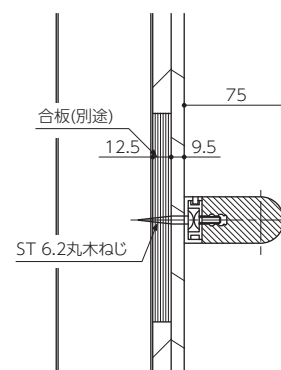


【RC】

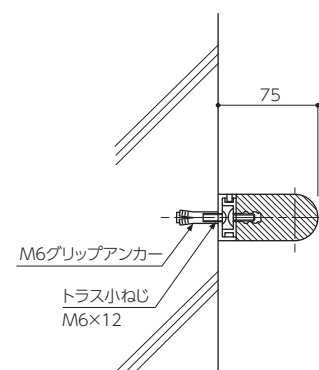


取付方法

①左記の製品寸法を確認し、ブラケット固定位置に穴を開け、ブラケットを壁面にしっかりと固定してください。

L 型の場合は、右勝手と左勝手があるので向きに注意してください。


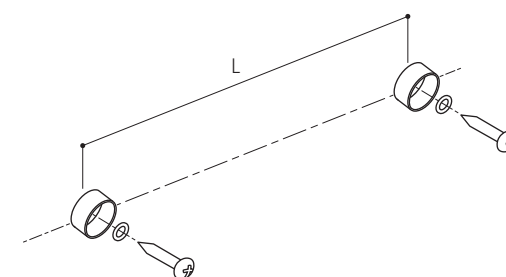


【I 型】

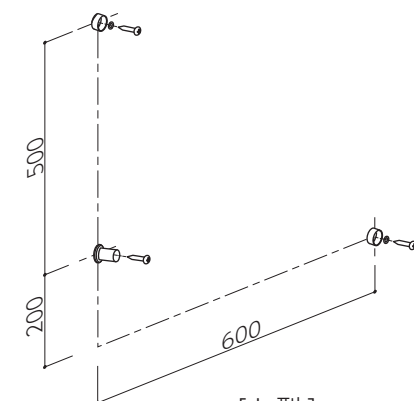

【L 型】※図は左勝手

②固定されたブラケットに手すり本体を差し込み、止めねじをブラケット 1 個につき 2 ヶ所の穴にねじ込み、六角レンチにて強く締め付けてください。

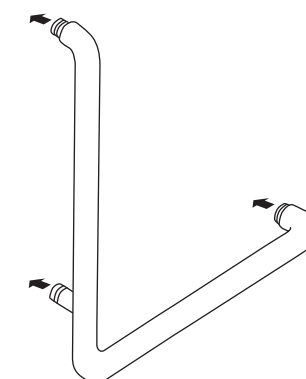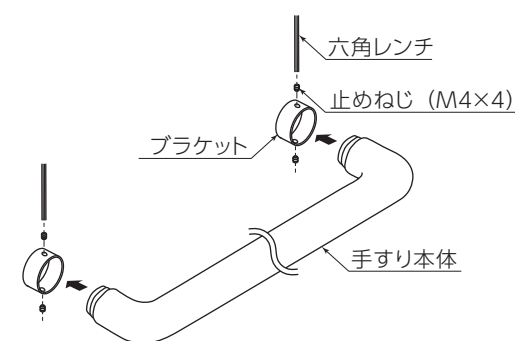

③最後に手すりにガタツキがないかを確認し、施工を終了します。

