

## ウォークルライン

## 安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 用語および記号、絵表記の説明

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**⚠** △ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

**🚫** 🚫 記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

**!** ● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

## ご利用にあたって

**⚠ 警告****禁止****ガタツキのあるものは使用しない**

本製品にガタツキ等の不具合が発生した場合、そのままご使用を続けると、手すりが外れて重大事故につながる場合があります。そのような場合は直ちに使用をやめ、最寄りの弊社相談窓口にご連絡ください。

**お願い****分解禁止****製品を分解・改造しない**

施工後は固定部のボルト等をゆるめたり、製品を分解・改造しないでください。使用時に脱落したり予期せぬ故障の原因になるばかりか、重大事故につながる場合があります。

**禁止****強い衝撃をあたえない**

本製品に物をぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。手すり部分が破損し思わぬケガの原因になります。

**禁止****安全荷重以上の力をかけない**

安全荷重は、水平・鉛直共981N(100kgf)です。それ以上の荷重をかけないでください。ゆがみや脱落等故障の原因となります。

**必ず実行****ぬれた手や、石けんのついた手で手すりを使用するときは十分注意する**

手や手すりがぬれていたり、石けんがついていたりすると手が滑り、重大事故につながるおそれがあります。

**必ず実行****介助が必要な使用者の場合、介助者は事故が発生しないよう十分に注意する**

使用者が手すりをつかみそこなうことにより、重大事故につながるおそれがあります。

**必ず実行****手すりと壁の間に手や腕が入り込まないように十分注意する**

手や腕を挟むなどにより、重大事故につながるおそれがあります。

**禁止****手すり以外の用途につかわない**

手すり以外の用途(ぶら下がったり、上に登ったり、ゆすったり、けったり)に使用すると、使用中に手すりが脱落し、重大事故につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

### ❗ お願い

#### 定期的な清掃をする

いつまでもきれいな状態を保つために定期的な清掃が必要です。ふだんはやわらかい布で乾拭きしてください。  
汚れがひどいときは、中性洗剤の1~2%の水溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。



### ❗ お願い

#### 静電気について

室内湿度により静電気が発生し、製品および壁を汚すおそれがありますので、室内清掃時には必要に応じて帯電防止剤を塗布してください。

帯電防止剤 推奨品  
商品名：SB-8リキッド  
メーカー：(株)ショーワ

※購入方法・使用方法などは、弊社相談窓口にご連絡ください。

### 🚫 禁止

#### アルカリ・酸性(弱酸性含む)・塩素系洗剤を使用しない

お手入れの際、アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤を使用すると、部品が変色や劣化をすることがあります。

### 🚫 禁止

#### クレンザー・磨き粉を使用しない

お手入れの際、クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンたわし等、傷つけやすいものを使用すると、部品表面に傷がつき光沢を失ったり、変色することがあります。

### 🚫 裸火厳禁

#### 火を近づけない

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。

### 🚫 禁止

#### 手すりの前に物や家具、什器を置かない

手すりを伝って歩く際の妨げになるものは、置かないでください。また、手すりに物を掛ける(消毒液ハンガーや清掃道具等)と、伝え歩きの妨げになります。

## お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

**ナカ工業株式会社**

URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

**ナカテクノメタル株式会社**

URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。